



KONICA MINOLTA

2020年4月28日

お客様各位

コニカミノルタジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー 営業推進部

平素はコニカミノルタ社製医療機器をご愛顧賜わりまして厚く御礼申し上げます。
この度、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大により、多くのお問い合わせを頂いております。
弊社パルスオキシメータ・プローブの消毒方法について、ご案内致します。

パルスオキシメータ・プローブの消毒に関するご案内

■対象機種

パルスオキシメータ : PULSOX-Neo、PULSOX-1、PULSOX-2、PULSOX-Lite、PULSOX-300、
PULSOX-300i
プローブ : SR-5C、SP-5C、LM-5C、SD-5C、UD-5C

その他の旧製品については、各製品取扱説明書記載の内容をご確認ください。

■使用可能な消毒薬剤および消毒手順

【PULSOX-Neo】

- 機器の清掃をする際は、本体から電池を取り外し、消毒液を含ませた脱脂綿またはやわらかい布で汚れを拭き取り、その後、ぬるま湯や水を含ませた脱脂綿、またはやわらかい布で消毒液を拭き取ってください。アルコールやシンナー等の有機溶剤、ポビドンヨードを使用したり、水につけたりしないでください。
- また、清掃時に発光部や受光部を傷つけないよう注意してください。清掃後は十分に乾燥させてください。ドライヤーなどは使用しないでください。
- 清掃時に機器を無理に開かないでください。無理に開くと破損の原因となります。



KONICA MINOLTA

- 使用可能な消毒液例は以下の通りです。

成分名	主な製品名と販売会社		上限濃度
エタノール	消毒用エタノール	健栄製薬（株）	1 倍液
クレゾール石鹼	クレゾール石鹼	健栄製薬（株）	33 倍液
次亜塩素酸ナトリウム	病院用ハイター	花王（株）	100 倍液
アルキルアミノオキシド水酸化カリウム第四級アンモニウム塩	クリンキーパー	花王（株）	20 倍液
塩化ベンザルコニウム	オスバン液 10%	武田製薬工業（株）	20 倍液
クロルヘキシジングルコン酸塩	ヒビデン液 5%	大日本住友製薬（株）	10 倍液
アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	テゴー 51 10%	アルフレッサファーマ（株）	20 倍液
第四級アンモニウム塩界面活性剤アルカリ剤	環境清掃ウエットクロス	スリーエムヘルスケア（株）	—
第四級アンモニウム塩界面活性剤	クリアパワー	白十字（株）	—
エタノール	ショードック スーパー	白十字（株）	—
エタノール	ワンショットプラス	白十字（株）	—
加速化過酸化水素	ハイロックス ワイプ	東栄部品（株）	—
アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0.5w/v% ハイジール水	丸石製薬（株）	1 倍液
イソプロパノール	70%イソプロピルアルコール	丸石製薬（株）	1 倍液

上限濃度を超えた濃度の消毒液を使用した場合は、本体が劣化するおそれがあります。消毒液の使用にあたっては、各消毒液の注意事項および用法・用量に従ってください。



KONICA MINOLTA

【SR-5C、SP-5C、LM-5C、SD-5C、UD-5C】

- 機器の清掃をする際は、中性洗剤か水を含ませた柔らかい布で拭いた後、乾いた布でしっかりと拭き取ってください。その他の方法や溶剤などは用いないでください。
- 指挿入部内を清掃するときは、消毒用アルコールを含ませた布で拭いてください。
- また清掃の際には接続コネクタ等の端子部には触れないでください。端子ピンの中折れなどにより故障・破損の原因になります。

● 各プローブの体に触れる部分

フィンガークリッププローブ SR-5C

指押さえゴム
受光部カバー
受光窓

指押さえゴム：シリコン
受光部カバー：ポリカーボネート
受光窓：シリコン

スポットチェックプローブ SP-5C

指押さえゴム
受光部カバー
受光窓

指押さえゴム：シリコン
受光部カバー：ポリカーボネート
受光窓：シリコン

モニタープローブ LM-5C

発光部 連結部 受光部
発光窓 (接触面) 受光窓

受光部、発光部
接触面：ポリプロピレン
受光窓、発光窓：シリコン
連結部：エラストマー

パーソナルプローブ SD-5C

プローブパッド

プローブパッド：ポリウレタン

ユニバーサルプローブ UD-5C

プローブカバー
(パッド) 発光窓
受光窓


プローブカバー(パッド)：
アクリロニトリルブタジエンゴム
発光窓、受光窓：シリコン



KONICA MINOLTA

【PULSOX-1 / PULSOX-2 / PULSOX-Lite / PULSOX-300 / PULSOX-300i】

- 機器の清掃をする際は、中性洗剤か水を含ませた柔らかい布で拭いた後、乾いた布でしっかりと拭き取ってください。その他の方法や溶剤などは用いないでください。
- 指挿入部内を清掃するときは、消毒用アルコールを含ませた布で拭いてください。
- PULSOX-300/PULSOX-300i 清掃の際には接続コネクタ等の端子部には触れないでください。端子ピンの中折れなどにより故障・破損の原因になります。

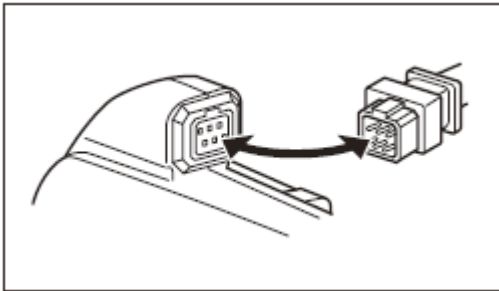

■ 注意事項

- 薬剤は適量で使用し、機器を浸漬したり、濡れたままの状態では放置したりしないでください。